




Rēd

by Spa Bohème

Rēd Box

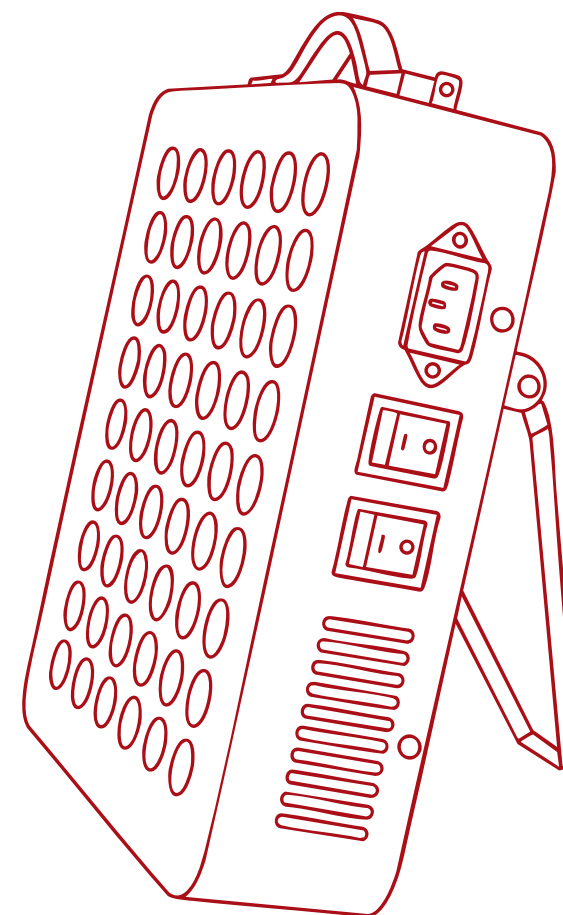

*Profesionální LED terapie
- nyní dostupná v našem wellness*

Jak používat



Příprava a nastavení

- Ošetření budoucnosti
- Rēd Box je prémiové zařízení využívající sílu červeného a blízkého infračerveného světla.
 - Panel umístíte 30–45 cm od ošetřované oblasti.
 - Můžete jej zavěsit na zeď nebo využít praktický stojánek pro maximální stabilitu.



Výběr režimu

- Hlavní módy ošetření
- RED: Ideální pro pleť, hojení a regeneraci povrchové tkáně.
 - INFRARED: Proniká hluboko do svalů a kloubů pro intenzivní zotavení.
 - COMBO: Synergie obou vlnových délek pro komplexní efekt ošetření.



Časový plán

- Obličej a krk: 10–15 minut.
 - Trup a záda: 15–20 minut.
 - Končetiny: 20 minut pro úlevu od napětí.
- Díky vysokému výkonu panelu stačí jedna relaxační koupel denně.



Kdy a jak často

- Obličej a krk: 10–15 minut.
 - Trup a záda: 15–20 minut.
 - Končetiny: 20 minut pro úlevu od napětí.
- Díky vysokému výkonu panelu stačí jedna relaxační koupel denně.

Pro více info kontaktujte recepci



Rēd
by Spa Bohème